


Talker-Ständer Talkstar

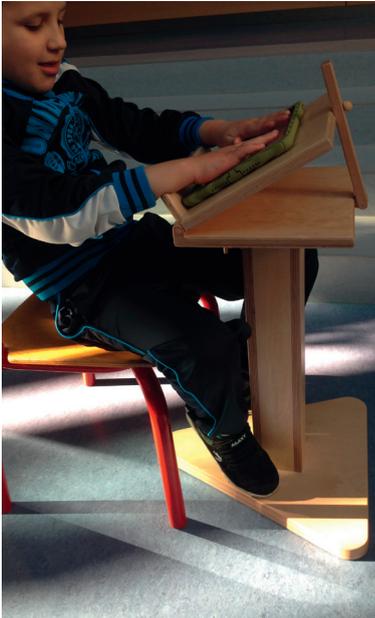

Bestell-Nr.: 580-111

Dieser stabile und ästhetische Ständer gibt dem Talker einen festen Platz und die Hände bleiben frei. Er kann zum Beispiel in der Schule im Stuhlkreis genutzt werden, wo der Talker gebraucht wird, aber auch Aufstehen, wieder Hinsetzen, Klatschen, Tanzen und Singen gefragt ist. Der Talker ist da, und die Hände bleiben frei um auch alles andere mitmachen zu können.

Auch beim Essen sorgt der Talkerständer für Entspannung, er kann einfach neben dem Tisch stehen, jederzeit erreichbar, aber doch nicht zwischen all den Schüsseln mit ihren gefährlichen Inhalten.

Die Tischhöhe und der Neigungswinkel sind einstellbar. Das Oberteil ist abnehmbar, der Talker-Ständer kann dann ohne den Fuß auch auf einem Tisch platziert werden. Der Talker steht so auch hier ganz stabil.

Der Talker-Ständer Talkstar ist ein Gemeinschaftsprojekt von Ariadne und allerHand und wird von Menschen mit Behinderungen hergestellt.

Material:

Talkstar ist aus massivem und robustem Multiplex gearbeitet, die schwere Bodenplatte gibt ihm die nötige Stabilität und verhindert das Umkippen.

Produktumfang:



Bodenplatte mit Sockel



Stiel




Oberteil



Fixierungsdübel für den Sockel und Fixierungsdübel zur Justierung des Oberteils

Aufbauanleitung:

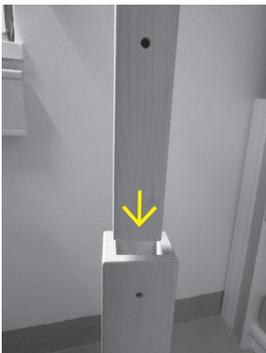

Schritt 1 – Befestigung des Stiels:

Stecken Sie den Stiel in den Sockel der Bodenplatte. Achten Sie darauf, dass dabei sowohl das Bohrloch im Sockel als auch die Bohrlöcher des Stiels nach vorne weisen.



Der Stiel wird in der erforderlichen Höhe mit dem Fixierungsdübel für den Sockel befestigt. Stecken Sie dafür den Dübel durch das Loch am Sockel in eines der Löcher am Stiel.



Schritt 2 – Befestigung des Oberteils:

Auf dem Stiel ist eine Platte zur Befestigung des Oberteils angebracht.




Die Schienen auf der Unterseite des Oberteils werden auf die Platte geschoben.



Auf einer Seite des Oberteils ist ein Dübel befestigt, dieser dient zur Fixierung des Oberteils an der Befestigungsplatte des Stiels.



Der Dübel zur Fixierung des Oberteils muss in dieses Loch geschoben werden. Schieben Sie das Oberteil so auf die Platte, dass das Oberteil mit dem Dübel fixiert werden kann.

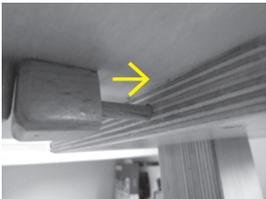


Der Dübel wird in das Loch an der Befestigungsplatte geschoben. Bitte stellen Sie sicher, dass das Oberteil immer auf der Platte fixiert ist, nur so wird ein unbeabsichtigtes Abrutschen des Oberteils vermieden.



Schritt 3 – Einstellen des Winkels:

Jetzt muss nur noch die Klappe im gewünschten Winkel fixiert werden. Heben Sie dazu die Klappe an und klappen Sie die Lochleiste hoch.

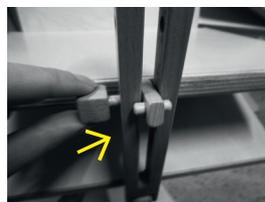

Befestigen Sie die Klappe im gewünschten Winkel mit dem Dübel zur Fixierung des Oberteils.

Der Talker-Ständer kann jederzeit wieder abgebaut werden. Gehen Sie dabei einfach anders herum wie oben beschrieben vor.

Bitte beachten Sie:

Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt gefertigt. Alle Bauteile sind passend aufeinander abgestimmt. Versuchen Sie nicht einzelne Bauteile mit Gewalt zusammenzufügen oder auseinanderzunehmen. Die Bauteile wurden so aufeinander abgestimmt, dass sie ohne viel Kraft miteinander verbunden werden können. Jeder Talkerständer ist ein Unikat, mischen Sie nicht Bauteile verschiedener Talker-Ständer. Sie erkennen jedes Modell an seiner individuellen Nummer, die auf den einzelnen Bauteilen eingeprägt ist. Bitte nehmen Sie nur Teile auseinander, die als Einzelteile in der Produktumfangs-Übersicht aufgelistet sind. Wenn Sie Schrauben oder geklebte Teile auseinandernehmen, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

ARIADNE BUCHDIENST
Daimlerstr. 23, 76185 Karlsruhe
Tel.: 0721-464729-029
Fax: 0721-464729-099
E-Mail: Bestellservice@ariadne.de
www.Ariadne-Ideenshop.de



Talkstar ist ein Gemeinschaftsprodukt von Ariadne und allerHand – hergestellt von Menschen mit Behinderungen.